
	<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b> <b>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b> Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 Botucatu – São Paulo – Brasil, Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	POP GE 096 – Pág.: 1 / 4	
		Emissão: 24/06/2021	
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b>	Revisão:	
<b>POP GE 096 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA MALETA DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE HEMOCOMPONENTES</b>			

**1.OBJETIVO:** Realizar a limpeza e desinfecção da maleta de transporte de hemocomponentes.

**2.ABRANGÊNCIA:** Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

**3.MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:**



**3.1.Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** luvas de procedimento, máscara cirúrgica e óculos de segurança.

**3.2.Materiais específicos para o procedimento:** álcool 70INPM, pano multiuso, esponja e papel toalha.

**4. PROCEDIMENTOS:**

1. Dirigir-se ao expurgo;
2. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
3. Realizar a paramentação: máscara cirúrgica, óculos de segurança e luvas de procedimento;
4. Abrir a maleta de transporte;
5. Inspeccionar a maleta. Na presença de material orgânico, retirar o excesso com papel toalha;
6. Lavar toda a superfície interna da maleta com esponja não abrasiva embebida em água e sabão neutro;
7. Lavar toda a superfície externa da maleta com esponja não abrasiva embebida em água e sabão neutro;
8. Enxaguar abundantemente em água corrente;
9. Secar com pano multiuso limpo e seco;

Aprovação da Gerência de Enfermagem: Enf. Darlene Bravim Cerqueira  
 Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf. Monique Antônia Coelho  
 Aprovação da CCIRAS - 2021  
 Aprovação SESMT -2021

	<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b> <b>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b> Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 Botucatu – São Paulo – Brasil, Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	POP GE 096 – Pág.: 2 / 4	
		Emissão: 24/06/2021	
	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b>	Revisão:	
<b>POP GE 096 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA MALETA DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE HEMOCOMPONENTES</b>			

1. Friccionar as superfícies da maleta com álcool 70INPM, em faixas paralelas, com movimentos em sentido único, longos e retos. Esperar secar espontaneamente;
2. Acondicioná-la em local apropriado (limpo);
3. Retirar as luvas de procedimento;
4. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);
5. Retirar a máscara cirúrgica e os óculos de segurança. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
6. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).



#### **5. CONTINGÊNCIAS:**

Não se aplica.

#### **6. OBSERVAÇÕES:**

1. As maletas devem ser higienizadas antes e após o uso. Cada unidade deverá utilizar a sua maleta de transporte exclusiva para transporte de hemocomponentes.
2. O expurgo não é recomendado para o acondicionamento.
3. Devido a exaustão do uso diário da esponja, recomenda-se trocá-la a cada 7 dias, ou antes caso necessário.
4. A maleta deve ser de polietileno ou similares, lavável, resistir à desinfecção e **portar a identificação de “Hemocomponentes”**.
5. Deve-se manter uma maleta para o transporte de hemocomponente e outra para o transporte de amostras laboratoriais.

Aprovação da Gerência de Enfermagem: Enf. Darlene Bravim Cerqueira  
 Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf. Monique Antônia Coelho  
 Aprovação da CCIRAS - 2021  
 Aprovação SESMT -2021

	<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b> <b>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b> Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 Botucatu – São Paulo – Brasil, Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	<b>POP GE 096 – Pág.: 3 / 4</b>	
		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b>	<b>Emissão: 24/06/2021</b>
<b>Revisão:</b>			
<b>POP GE 096 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA MALETA DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE HEMOCOMPONENTES</b>			

6. Verificar com frequência as condições da maleta, observando se existem rachaduras e/ou furos e solicitar a troca da mesma.
7. O SESMT orienta que os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro, secos com papel macio e/ou pano multiuso (sem friccionar o papel, para não danificar as lentes) e, apenas nos casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou se ocorrer projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve-se utilizar álcool 70INPM e, neste caso, deve-se utilizar luvas de procedimento no processo de lavagem e desinfecção dos óculos.

## **7. AUTORES e REVISORES:**



**7.1. Autores:** Monique Antônia Coelho, Amanda dos Santos Cecílio, Ana Carolina Sanches Antônio, Daniele de Oliveira Gomes, Priscila Eburneo Laposta Spadotto e Thaís Amanda Leccioli.

**7.2. Revisores:** Juliana da Silva Oliveira e Patrícia Carvalho Garcia

## **8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:**

1. GARCIA, PC; BONEQUINI P. Manual de transfusão para enfermagem. Botucatu: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Medicina/Hemocentro, Famesp, 2015. Disponíveis em: <<http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2017/12/MANUAL-DE-TRANSFUS%C3%83O-PARA-ENFERMAGEM-2017.pdf>> Acesso em: 31 mai 2021.
2. HENCKE, JM; GÓES, GAR. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão. Módulo 1: Prevenção e Controle de Infecção. Prefeitura Municipal de Curitiba. Secretaria Municipal da Saúde. Departamento de Atenção Primária a Saúde. Curitiba, 2020. Disponível em: <<https://sbdpr.com.br/download/1.%20MODULO%201-%20POP%20PREVENCAO%20E%20CONTROLE%20DE%20INFECCAO-%20julho2020.pdf>> Acesso em: 01 jun 2021.

Aprovação da Gerência de Enfermagem: Enf. Darlene Bravim Cerqueira  
 Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf. Monique Antônia Coelho  
 Aprovação da CCIRAS - 2021  
 Aprovação SESMT -2021

	<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b> <b>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b> Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 Botucatu – São Paulo – Brasil, Tel. (14) 3811-6220 (14) 3811-6000	<b>POP GE 096 – Pág.: 4 / 4</b>
		<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA</b> <b>GERÊNCIA DE ENFERMAGEM</b>

**POP GE 096 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA MALETA DE TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE HEMOCOMPONENTES**

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b> <b>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU</b> NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	
<b>1.1. Título:</b> POP GE 096 – Limpeza e Desinfecção da Maleta de Transporte Intra-hospitalar de Hemocomponentes	
<b>1.2. Área Responsável:</b> Gerência de Enfermagem	
<b>1.3. Data da Elaboração:</b> 24/06/2021 <b>Total de páginas:</b> 04 <b>Data da Revisão:</b> __/__/__ <b>Número da Revisão:</b>	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO</b>	
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: <b>POP GE 096 – Limpeza e Desinfecção da Maleta de Transporte Intra-hospitalar de Hemocomponentes.</b>	
Aprovo também a divulgação do meu nome completo:	
<b>Data:</b> 01/04/2022	<b>Assinatura:</b> <i>Monique Antônia Coelho</i>  Monique Antônia Coelho Supervisora Técnica Serviço de Terapia Intensiva COREN - SP 0343579 <b>Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho</b>
<b>Data:</b> 01/04/2022	<b>Assinatura:</b> <i>Darlene Bravim Cerqueira</i>  Darlene Bravim Cerqueira Gerente de Enfermagem do HCFMB COREN-SP 205973 <b>Gerente de Enfermagem: Darlene Bravim Cerqueira</b>

Elaboração do Termo: Enfª Juliana S. Oliveira, Tatiane Biazon Rossi Benvenuto, Enfª Cristiane R. Fortaleza	Aprovação Superintendência e Chefe do Gabinete do HC: Prof. Adj. André Luis Balbi e Prof. Dr. José Carlos Trindade Filho.
---	--

Aprovação da Gerência de Enfermagem: Enf. Darlene Bravim Cerqueira  
 Aprovação da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf. Monique Antônia Coelho  
 Aprovação da CCIRAS - 2021  
 Aprovação SESMT -2021

Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade - 2021