



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 002 PREPARO DA SOLUÇÃO FIXADORA PARA CITOINCLUSÃO



POP NAPAT CITO 002 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 26/06/2022

1. OBJETIVO:

Descrever o procedimento técnico para o preparo do fixador para material biológico ou de punção aspirativa, contendo partes sólidas destinado à embocagem em parafina para análise citológica.

2. ABRANGÊNCIA:

Colaboradores do Laboratório de Citopatologia.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Luva de látex; Avental descartável (recomendado) ou jaleco padronizado, Respirador PFF2 com filtro de carvão ativado e Óculos de proteção.

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: Álcool absoluto; Ácido acético; Formol tamponado 10% (obtida na sala de Macroscopia); Etiqueta autocolante para o frasco; Proveta graduada de 1000 ml. Capela de exaustão.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Vestir o avental, o respirador PFF2 com filtro de carvão ativado, os óculos de proteção e as luvas;

4.3. Ligar a capela de exaustão de vapores e proceder todo preparo na capela, devido ao vapor de ácido acético;

4.4. Adicionar em um frasco com tampa:

- Colocar 500ml de álcool etílico absoluto, com o uso de proveta graduada de 1000ml;
- Acrescentar 50ml de ácido acético glacial e 150ml de formol tamponado.

4.5. Adicionar etiqueta identificada como fixador de citoinclusão, com data do dia do procedimento e nome do responsável que fez a solução;

4.6. Retirar as luvas e o avental descartável, descartar em lixo hospitalar;

Aprovação: Supervisor do Núcleo | Diretor do Serviço Marcos Roberto Franchi e Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022 | Aprovação CCIRAS / SESMT



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 002 PREPARO DA SOLUÇÃO FIXADORA PARA CITOINCLUSÃO



POP NAPAT CITO 002 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 26/06/2022

4.7. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.8. Retirar os óculos de segurança e o respirador descartável PFF2 dotado de camada de carvão ativado, sem válvula;

4.9. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.10. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.11. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

5. CONTINGÊNCIAS:

Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.2. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES e REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira.

7.2. Revisores – Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira, Marcos Roberto Franchi e Beatriz Melo Santos.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 002 PREPARO DA SOLUÇÃO FIXADORA PARA CITOINCLUSÃO



POP NAPAT CITO 002 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 26/06/2022

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- O Laboratório de Citopatologia – Aspectos Técnicos e Operacionais. Conceição Queiroz e Daisy Lima. Editora Universitária UFPE, 2000.

- A composição do fixador descrito acima foi obtido pela comunicação pessoal em encontro de técnicos de histopatologia 2007.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria GM nº 485, de 11 de novembro de 2005.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 002 PREPARO DA SOLUÇÃO FIXADORA PARA CITOINCLUSÃO



POP NAPAT CITO 002 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 26/06/2022

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP NAPAT CITO 002 – PREPARO DA SOLUÇÃO FIXADORA PARA CITOINCLUSÃO

1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA – NAPAT

1.3. Data da Elaboração: 16/05/2012 Total de páginas: 05 Data da Revisão: 26/06/2022

Número da Revisão: 04

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira	Núcleo de Anatomia Patológica	
Marcos Roberto Franchi	Núcleo de Anatomia Patológica	
Beatriz Melo Santos	Estagiária – Núcleo de Gestão da Qualidade	

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT CITO 002 – PREPARO DA SOLUÇÃO FIXADORA PARA CITOINCLUSÃO.

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: 25/07/2022	Supervisor: Marcos Roberto Franchi
	Assinatura:
Data: 07/07/2022	Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais
	Assinatura:

Elaboração: EnFª Juliana S. Oliveira, Tatiene Biazon Rossi Benvenuto, EnFª Cristiane R. Fortaleza
Aprovação Superintendência e Chefe de Gabinete do HC: Prof. Adj. André Luis Balbi e Prof. Dr. José Carlos Trindade Filho.

Aprovação: Supervisor do Núcleo | Diretor do Serviço Marcos Roberto Franchi e Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022 | Aprovação CCIRAS / SESMT