



# PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 004 COLORAÇÃO RÁPIDA DE PANÓTICO



POP NAPAT CITO 004 - PÁG.: 1/3 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 26/06/2022

## 1. OBJETIVO:

Processar materiais hemorrágicos de citologia exfoliativa para diagnóstico rápido e para avaliação da adequabilidade da amostra (celularidade).

## 2. ABRANGÊNCIA:

Colaboradores da Citopatologia.

## 3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** Luva de látex; Avental descartável (recomendado) ou jaleco padronizado;

**3.2. Materiais Específicos para o Procedimento:** Kit – Panótico Rápido Corante para uso hematológico (LB Laborclin produtos para laboratórios Ltda), Lâminas, Lamínulas 24x50, Meio de montagem Permout (Fisher®), Pinça, Xilol.

## 4. PROCEDIMENTOS:

1 . Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

2 . Vestir as luvas e avental;

### 4.1. Coloração de Panótico rápido (3 corantes):

- **Panótico rápido 1:** compõe-se por uma solução de triarilmetano a 0,1%.
- **Panótico rápido 2:** compõe-se por uma solução de xantenos a 0,1%.
- **Panótico rápido 3:** compõe-se por uma solução de tiazinas a 0,1%.

4.1.1. Preparar os esfregaços e deixar secar em temperatura ambiente;

4.1.2. Preencher 3 recipientes (porta-lâminas plásticos) previamente identificados com as soluções de panótico 1, 2 e 3, respectivamente;

4.1.3. Submergir as lâminas na solução 1 mantendo-se um movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos (5 imersões de 1 segundo cada);

4.1.4. Deixar escorrer bem;

Aprovação: Supervisor do Núcleo | Diretor do Serviço Marcos Roberto Franchi e Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022 | Aprovação CCIRAS / SESMT



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO **004** COLORAÇÃO RÁPIDA DE PANÓTICO



POP NAPAT CITO **004** - PÁG.: **2/3** EMISSÃO: **16/05/2012** REVISÃO Nº **05** : **26/06/2022**

4.1.5. Submergir as lâminas na solução 2 mantendo-se um movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos (5 imersões de 1 segundo cada) e deixar escorrer;

4.1.6. Submergir as lâminas na solução 3 mantendo-se um movimento contínuo de cima para baixo ou para os lados durante 5 segundos (5 imersões de 1 segundo cada) e deixar escorrer bem;

4.1.7. Lavar com água deionizada recente (de preferência tamponada, pH 7,0);

4.1.8. Secar ao ar na posição vertical e com o final do esfregaço voltado para cima;

4.1.9. Observar ao microscópio de luz;

4.1.10. Retirar avental, as luvas, descartar em lixo hospitalar;

4.1.11. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

### 5. CONTINGÊNCIAS:

Não se aplica.

### 6. OBSERVAÇÕES:

Os tempos de imersão sugeridos podem ser alterados conforme critério do usuário para ajustes necessários.

### 7. AUTORES e REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira.

7.2. Revisores – Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira, Marcos Roberto Franchi e Beatriz Melo Santos.

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bula do corante da Laborclin produtos para laboratórios Ltda.



# PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT CITO 004 COLORAÇÃO RÁPIDA DE PANÓTICO



POP NAPAT CITO 004 - PÁG.: 3/3 EMISSÃO: 16/05/2012 REVISÃO Nº 05 : 26/06/2022

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP NAPAT CITO 004 – COLORAÇÃO RÁPIDA DE PANÓTICO		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA – NAPAT		
1.3. Data da Elaboração: 16/05/2012 Total de páginas: 03 Data da Revisão: 04/05/2021 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>ASSINATURA</b>
Marcos Roberto Franchi	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Dra. Maria Luiza Cotrim Sartor de Oliveira	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Beatriz Melo Santos	Núcleo de Gestão da Qualidade – NGQ	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT CITO 004 – COLORAÇÃO RÁPIDA DE PANÓTICO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 25/07/2022	Supervisor: Marcos Roberto Franchi	
	Assinatura:	
Data: 21/07/2022	Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes	
	Assinatura:	

Elaboração: En <sup>o</sup> Juliana S. Oliveira, Tatiane Biazon Rossi Benvenuto, En <sup>o</sup> Cristiane R. Fortaleza	Aprovação Superintendência e Chefe de Gabinete do HC: Prof. Adj. André Luis Balbi e Prof. Dr. José Carlos Trindade Filho.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação: Supervisor do Núcleo | Diretor do Serviço Marcos Roberto Franchi e Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2022 | Aprovação CCIRAS / SESMT

NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT