



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO 005 INCLUSÃO DE FRAGMENTO HISTOLÓGICO OU CITOPATOLÓGICO EM PARAFINA



POP NAPAT HISTO 005 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 21/05/2012 REVISÃO Nº 03 : 26/05/2021

1. OBJETIVO:

Inclusão de fragmentos histológicos ou citopatológicos em Cassete Histológico.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe Técnica do Laboratório de Histologia e Colaboradores.

3. MATERIAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Respirador descartável com carvão ativado (PFF2), avental descartável, luvas de procedimento e óculos de segurança.

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: Suporte para Cassetes Histológicos, Parafina e Pinça Anatômica.

3.3. Equipamentos: Central de Inclusão.

4. PROCEDIMENTOS:

1 - Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

2 - Vestir o avental, respirador, óculos de proteção e luvas de procedimento;

3 - Selecionar a temperatura desejada na Central de Inclusão; (65°C a 68°C);

4 - Monitorar a temperatura, que deverá manter-se constante.

4.1. Iniciar inclusão:

4.1.1. Retirar o cassete histológico do processador histológico (Autotécnico);

4.1.2. Colocar o cassete histológico no banho de parafina da central de inclusão;

4.1.3. Abrir o cassete histológico e retirar o fragmento;

4.1.4. Fixar o fragmento dentro do molde com um pouco de parafina;

4.1.5. Colocar o cassete histológico sobre o molde, preenchendo com parafina;

4.1.6. Colocar o molde na parte gelada da central de inclusão;

4.1.7. Retirar o molde depois que a parafina endurecer;

4.1.8. Retirar as luvas e avental, descartar em lixo branco;

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes e Adriana de Fátima Souza Gonçalves



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO **005** INCLUSÃO DE FRAGMENTO HISTOLÓGICO OU
CITOPATOLÓGICO EM PARAFINA



POP NAPAT HISTO **005** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **21/05/2012** REVISÃO N° **03** :**26/05/2021**

4.1.9. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.10. Retirar os óculos de segurança e respirador descartável PFF2 dotado de camada de carvão ativado, sem válvula;

4.1.11. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.12. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.1.13. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

5. CONTINGÊNCIAS:

Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Observar o ponto de fusão da parafina para inseri-la no molde.

6.2. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.3. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Eduvaldo Tomé Franco, José Carlos Pedroso de Lima e Marcos Roberto Franchi.

7.2. Revisores – Marcos Roberto Franchi.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO 005 INCLUSÃO DE FRAGMENTO HISTOLÓGICO OU CITOPATOLÓGICO EM PARAFINA



POP NAPAT HISTO 005 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 21/05/2012 REVISÃO Nº 03 : 26/05/2021

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Michalany, J. Técnicas Histológicas em Anatomia Patológica com instruções para o cirurgião, enfermeira e citotécnico. Editora Michalany, 3ª Edição, 1998.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT HISTO 005 INCLUSÃO DE FRAGMENTO HISTOLÓGICO OU CITOPATOLÓGICO EM PARAFINA



POP NAPAT HISTO 005 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 21/05/2012 REVISÃO Nº 03 :26/05/2021

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br</p>	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		
1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP NAPAT HISTO 005 - INCLUSÃO DE FRAGMENTO HISTOLÓGICO OU CITOPATOLÓGICO EM PARAFINA		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA - NAPAT		
1.3. Data da Elaboração: 21/05/2012 Total de páginas: 03 Data da Revisão: 26/05/2021 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Eduvaldo Tomé Franco	Núcleo de Anatomia Patológica - NAPAT	
José Carlos Pedroso de Lima	Núcleo de Anatomia Patológica - NAPAT	
Marcos Roberto Franchi.	Núcleo de Anatomia Patológica - NAPAT	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT HISTO 005 - INCLUSÃO DE FRAGMENTO HISTOLÓGICO OU CITOPATOLÓGICO EM PARAFINA		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 11/08/2022	Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais Assinatura:	

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais e Adriana de Fátima Souza Gonçalves