



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO **008** PLASTIFICAÇÃO PARA ARQUIVO PERMANENTE DE ÓRGÃOS ANATÔMICOS (ÓBITOS INTERNOS E EXTERNOS (SVO) DE CAUSAS NATURAIS)



POP NAPAT SVO **008** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **04/04/2019** REVISÃO Nº **01** : **26/04/2021**

### 1. OBJETIVO:

Padronizar os procedimentos de plastificação de órgãos anatómicos do paciente em óbito, após realização de exame necroscópico, para arquivo permanente.

### 2. ABRANGÊNCIA:

Área técnica de necrópsia; equipe médica.

### 3. RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** avental descartável hidrorrepelente, respirador peça facial inteira com filtro P2/P95, luvas para procedimentos não cirúrgicos, luvas de borracha de cano longo com sistema de garroteamento, sapatilhas descartáveis (propé), botas de borracha de cano longo.

**3.2. Materiais:** Plástico em pvc (flexível), liso e transparente, com espessura de 0,40mm; Mesa; Régua; Estilete; Formol 10%.

**3.3. Equipamentos:** Máquina Plastificadora.

### 4. PROCEDIMENTOS:

#### 4.1. Equipe Médica

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.2. Realizar a paramentação necessária conforme POP NAPAT GER 007 – Paramentação e Desparamentação de Profissionais de Saúde para a Realização de Procedimentos Necroscópicos e Limpeza da Sala de Procedimentos;

4.1.3. Selecionar os órgãos para arquivamento permanente;

4.1.4. Analisar e interpretar diagnóstica do bloco anatómico, visando o ensino em aula prática, sobre diversas patologias;

4.1.5. Autorizar a plastificação dos órgãos anatómicos;

4.1.6. Realizar a desparamentação necessária conforme POP NAPAT GER 007 – Paramentação e Desparamentação de Profissionais de Saúde para a Realização de Procedimentos Necroscópicos e Limpeza da Sala de Procedimentos;



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO **008** PLASTIFICAÇÃO PARA ARQUIVO PERMANENTE DE ÓRGÃOS ANATÔMICOS (ÓBITOS INTERNOS E EXTERNOS (SVO) DE CAUSAS NATURAIS)



POP NAPAT SVO **008** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **04/04/2019** REVISÃO Nº **01** : **26/04/2021**

4.1.7. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

### 4.2. Técnico de Necropsia

4.2.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2.2. Realizar a paramentação necessária conforme POP NAPAT GER 007 – Paramentação e Desparamentação de Profissionais de Saúde para a Realização de Procedimentos Necroscópicos e Limpeza da Sala de Procedimentos;

4.2.3. Separar os órgãos que devem ser plastificados;

4.2.4. Cortar o plástico em medida suficiente para acondicionar o órgão desejado (2 cortes);

4.2.5. Selar (na máquina plastificadora), as duas porções menores e uma porção maior dos 2 cortes de plástico, formando uma pequena “bolsa” de plástico;

4.2.6. Colocar o órgão dentro da “bolsa” de plástico e preencher com formol 10%, em volume suficiente para permear todo o órgão;

4.2.7. Identificar a “bolsa” de plástico com a numeração interna do Setor, conforme sequência da lista de identificação;

4.2.8. Arquivar nos armários de madeira (arquivo permanente) disponíveis no Setor de Necropsia, exclusivamente para este fim;

4.2.9. Realizar a desparamentação necessária conforme POP NAPAT GER 007 – Paramentação e Desparamentação de Profissionais de Saúde para a Realização de Procedimentos Necroscópicos e Limpeza da Sala de Procedimentos;

4.2.10. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

## 5. CONTINGÊNCIAS:

Não é possível realizar os procedimentos, sem os EPI's, materiais e equipamentos descritos neste POP.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO **008** PLASTIFICAÇÃO PARA ARQUIVO PERMANENTE DE ÓRGÃOS ANATÔMICOS (ÓBITOS INTERNOS E EXTERNOS (SVO) DE CAUSAS NATURAIS)



POP NAPAT SVO **008** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **04/04/2019** REVISÃO Nº **01** : **26/04/2021**

### 6. OBSERVAÇÕES:

Utilizar a máquina plastificadora em temperatura branda, para não derreter o plástico.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Marcos Roberto Franchi, Prof. Dra. Maria Justina D. B. Felipe, José Edison Martins.

7.2. Revisores – Dra. Daniela Cristina dos Santos, Marcos Roberto Franchi, José Edison Martins.

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – A Declaração de Óbito: documento necessário e importante – Série A. Normas e Manuais Técnicos – Brasília, 2006.

- MINISTÉRIO DA SAÚDE – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Resolução da Diretoria Colegiada nº 306, de 7 de dezembro de 2004, versando sobre como proceder para peças anatômicas humanas, tecidos, membros, órgãos, e outros resíduos de serviços de saúde.

- COSTA, HO. Relatório de Gestão 2010 do Serviço de Verificação de Óbitos Antenor Teixeira Leal da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – Maceió – Uncisal, 2010.

- Lei nº 5.452, de 22 d dezembro de 1986. Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Reorganiza os Serviços de Verificação de Óbitos no Estado de São Paulo.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO 008 PLASTIFICAÇÃO PARA ARQUIVO PERMANENTE DE ÓRGÃOS ANATÔMICOS (ÓBITOS INTERNOS E EXTERNOS (SVO) DE CAUSAS NATURAIS)



POP NAPAT SVO 008 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 04/04/2019 REVISÃO Nº 01 : 26/04/2021

### 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6210 / (14) 3811-6215 - E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		
<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP NAPAT SVO 008 – PLASTIFICAÇÃO PARA ARQUIVO PERMANENTE DE ÓRGÃOS ANATÔMICOS (ÓBITOS INTERNOS E EXTERNOS (SVO) DE CAUSAS NATURAIS).		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA – NAPAT		
1.3. Data da Elaboração: 04/04/2019 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 26/04/2021 Número da Revisão: 01		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>ASSINATURA</b>
Marcos Roberto Franchi	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Dra. Daniela Cristina dos Santos	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
José Edison Martins	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT SVO 008 – PLASTIFICAÇÃO PARA ARQUIVO PERMANENTE DE ÓRGÃOS ANATÔMICOS (ÓBITOS INTERNOS E EXTERNOS (SVO) DE CAUSAS NATURAIS).		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 14/10/2021	Nome Completo Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes	
	Assinatura:	

Aprovação do Diretor do Serviço / Gerência de Diretor de Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Moraes e Adriana de Fátima Souza Gonçalves

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade: Gestão 2021 / Aprovação CCIRAS / SESMT: Prof. Assoc. Dr. Carlos Magno Castelo B. Fortaleza / Eng. Fábio Suraci Picchiotti