
	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n UNESP Campus de Botucatu – CEP 18618-687 – Botucatu/SP Tel. (14) 3811-6335 / (14) 3811-6135 / (14) 3811-6100. E-mail: lucas.cornetta@unesp.br	POP SCD 009 – Pág.: 1 / 4	
		Emissão: 26/09/2015	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA – SCD	Revisão nº: 03	30/03/2021
POP SCD 009 – REPROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIOS PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA			

1. **OBJETIVO:** Assegurar a limpeza e desinfecção de alto nível do endoscópio utilizado durante a Ecocardiografia Transesofágica.

2. **ABRANGÊNCIA:** Médico cardiologista, Enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem



3. **MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:**

3.1. **Equipamento de proteção individual (EPIs):** Luvas de procedimento, óculos de proteção, avental descartável, máscara descartável e óculos de proteção.

3.2. **Materiais e Equipamentos:** 01 sabão líquido padronizado pela instituição, 01 pano multiuso apropriado para endoscópio, 01 cuba para imergir o endoscópio em solução, solução de ácido peracético 0,09%, 01 lençol, 01 caixa para armazenar o endoscópio na posição indicada pelo fabricante, 01 relógio.

4. **PROCEDIMENTOS:**

1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou Álcool Gel (mínimo 15 segundos);
2. Colocar as luvas de procedimento, avental descartável, máscara descartável e óculos de proteção;
3. Transportar o endoscópio até a pia, ao término do exame o médico;
4. Preparar a solução de ácido peracético em cuba específica para esse fim conforme diluição;
5. Realizar a lavagem do mesmo com água corrente;
6. Aplicar sabão padronizado, com movimentos de cima para baixo para a remoção de material orgânico presente na sonda;
7. Remover todo o sabão existente no equipamento;
8. Imergir o endoscópio em solução de ácido peracético na cuba previamente preparada;
9. Contar no relógio 10 minutos de imersão;
10. Retirar o endoscópio da solução ao término de 10 minutos;
11. Lavar abundantemente o endoscópio em água corrente;
12. Realizar a secagem com lençol;
13. Transportar para o local definitivo (maleta) dos endoscópio;
14. Acondicionar em caixa apropriada para o próximo exame;
15. Retirar as luvas, avental, máscara e óculos de proteção;
16. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n UNESP Campus de Botucatu – CEP 18618-687 – Botucatu/SP Tel. (14) 3811-6335 / (14) 3811-6135 / (14) 3811-6100. E-mail: lucas.cornetta@unesp.br	POP SCD 009 – Pág.: 2 / 4	
		Emissão: 26/09/2015	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA – SCD	Revisão nº: 03	30/03/2021
POP SCD 009 – REPROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIOS PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA			

Álcool Gel (mínimo 15 segundos);

17. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
18. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

5. CONTINGÊNCIA: Na falta do Ácido Peracético 0,09%, remarcar o exame.



6. OBSERVAÇÕES:

1. Durante a manipulação ter o cuidado para que o endoscópio não se choque com superfície alguma e não seja dobrado.
2. Seguir criteriosamente a diluição do Ácido Peracético antes de imergir o equipamento em solução.
3. Em casos de pacientes com alguma precaução: contato, gotículas ou aerossóis, o profissional de saúde deve seguir orientações do Protocolo da CCIRAS – **PRC CCIRAS 012** – PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DE CONTATO, disponível na intranet do HC: <http://testesite.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2020/04/PRC-CCIRAS-012-Protocolo-de-Medidas-de-Precaução-de-Contato.pdf>.
4. Em caso de pacientes internados registrar o RG, Nome, na planilha dos indicadores de qualidade, especificando a presença ou não da pulseira de identificação.
5. Os óculos de proteção devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70° ou de quaternário de amônia. Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.
6. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES e REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores – Regina Célia Coneglian e Sibeles Aparecida Della Coletta.

7.2. Revisores – Amanda dos Santos Cecílio e Lucas Cornetta.

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n UNESP Campus de Botucatu – CEP 18618-687 – Botucatu/SP Tel. (14) 3811-6335 / (14) 3811-6135 / (14) 3811-6100. E-mail: lucas.cornetta@unesp.br	POP SCD 009 – Pág.: 3 / 4	
		Emissão: 26/09/2015	
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DIAGNÓSTICA – SCD	Revisão nº: 03	30/03/2021
POP SCD 009 – REPROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIOS PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA			

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HENDRICKS, H. **Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas.** Apostila . São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.
- FELIPPE; M.J.D.B; SILVA, N.A.M; GARCIA, V.C. MB. **Manual de Procedimentos Operacionais Padrão da Unidade de Internação – Terceiro Andar Esquerdo.** Hospital Estadual Bauru. 2006. R 03, 32p.
- SERRANO JUNIOR, C.V.; TIMERMAN, A; STEFANINI E. **Tratado de Cardiologia.** Manole. Barueri: 2ª ed.2009.

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

Aprovação: Gerência de Enfermagem do NPDT / Gerência de Enfermagem do HC: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira e Enfª Darlene Bravim Cerqueira	
Assessoria Núcleo de Gestão da Qualidade Gestão 2021	Aprovação CCIRAS / SESMT: Prof. Assoc. Dr. Carlos Magno Castelo B. Fortaleza / Eng. Fábio Suraci Picchiotti