



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **025** CUIDADOS E FLUXO COM O APARELHO DE
ENDOSCÓPICO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **025** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **21/05/2020**

1. OBJETIVO:

Descrever os cuidados e o fluxo de endoscópios, que são usados nos exames endoscópicos, visando à segurança do paciente e da equipe envolvida no procedimento atendendo a legislação vigente.

2. ABRANGÊNCIA: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem do Serviço de Endoscopia.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): gorro, roupa privativa do setor, calçado fechado, luvas de procedimento, óculos de proteção.

3.2. Materiais e Equipamentos para Transporte de Endoscópios limpos para a Sala de Exames: Bacia redonda designada como limpo; Aparelho de endoscópio respectivo para o exame; Válvulas respectivas do aparelho que será encaminhado.

3.3. Materiais e Equipamentos para Transporte de Endoscópios sujos para a Sala de Desinfecção: Bacia quadrada designada como sujo; Aparelho de endoscópio respectivo do exame realizado; Válvulas respectivas do aparelho que foi usado; Etiqueta com identificação do paciente em que o aparelho foi usado.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Transporte de Endoscópios limpos para a Sala de Exames

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.2. Colocar os EPIs: óculos de proteção, luvas de procedimento e gorro;

4.1.3. Escolher o aparelho respectivo para o exame a ser realizado junto ao armário de aparelhos limpos;

4.1.4. Pegar o aparelho com cuidado, e acomodá-lo dentro da bacia redonda limpa;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **025** CUIDADOS E FLUXO COM O APARELHO DE
ENDOSCÓPICO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **025** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **21/05/2020**

4.1.5. Encaixar as válvulas: aspiração, água e ar no aparelho que estão localizadas em recipientes plásticos junto a mesa de bacias limpas;

4.1.6. Encaminhar a bacia com o aparelho para a sala de exames;

4.1.7. Encaixar o aparelho no suporte do rack;

4.1.8. Conectar o aparelho na processadora;

4.1.9. Encaixar o tanque de água no local adequado;

4.1.10. Encaixar a conexão da mangueira do frasco de aspiração no local adequado;

4.1.11. Manter a bacia limpa na sala de exames;

4.1.12. Auxiliar no exame, conforme determinação POP SEDT 004 – Atenção ao Paciente Durante o Exame de Endoscopia

4.2. Transporte de Endoscópios sujos para a Sala de Desinfecção:

4.2.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2.2. Colocar os EPIs: óculos de proteção, luvas de procedimento e gorro;

4.2.3. Retirar o aparelho do suporte do rack;

4.2.4. Desconectar a borracha de aspiração e o tanque de água;

4.2.5. Acomodar o aparelho sujo dentro da bacia quadrada com tampa designado como bacia suja;

4.2.6. Identificar a bacia com a etiqueta do paciente a fim de registrar o uso do aparelho;

4.2.7. Encaminhar para a sala de desinfecção (ambiente sujo), e acomodar o aparelho no rack que estará localizado pra fora da sala;

4.2.8. Retirar os EPIs;

4.2.9. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **025** CUIDADOS E FLUXO COM O APARELHO DE ENDOSCÓPICO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **025** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **21/05/2020**

5. CONTINGÊNCIA:

Caso haja algum problema detectado em relação ao aparelho, avisar a Enfermeira responsável para as devidas providências.

6. AUTORES E REVISORES

6.1. Autores / Colaboradores – Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito.

6.2. Revisores – Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Felipe MJDB, Novelli SAP, Sato, AL. Manual de Normas e Rotinas da Unidade de Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2004. 46 p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas recomendadas. 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.

- Oliveira JCB, Cecílio AS, Vivian CE, Golveia DA, Franco EAT. Procedimento Operacional Padrão 18 – Assistência de Enfermagem em Endoscopia. Hospital Estadual Bauru. 2007. 1 – 19 p.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

POP SEDT **025** CUIDADOS E FLUXO COM O APARELHO DE
ENDOSCÓPIO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA



POP SEDT **025** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **06/03/2017** REVISÃO Nº **02** : **21/05/2020**

8. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | |
|---|---|--|
| | HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade@hcfmb.unesp.br | |
| TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO | | |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: POP SEDT 025 | | |
| 1.1. Título: CUIDADOS E FLUXO COM O APARELHO DE ENDOSCÓPIO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA | | |
| 1.2. Elaboradores: Tatiane Santa Rosa Diniz, Cassio Vieira de Oliveira, Fernanda Cristina Basques, Prof. Dra Maria Justina D.B. Felipe, Nilza Martins Ravazoli Brito. | | |
| 1.3. Revisores: Tatiane Santa Rosa Diniz e Fernanda Cristina Basques | | |
| 1.4. Responsável pela Autorização: | | |
| Nome: <i>Tatiane Santa Rosa Diniz</i> | Telefone: <i>(14) 990360784</i> | |
| CPF: <i>20184156807</i> | e-mail: <i>tatiyaniloma@yahoo.com.br</i> | |
| Departamento/Serviço: | | |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: FORMATO: PDF | | |
| Data da Elaboração: <u>06/03/2017</u> Total de páginas: <u>03</u> Data da Revisão: <u>21/05/2020</u> | | |
| Número da Revisão: <u>02</u> | | |
| 3. DECLARAÇÃO DO ELABORADOR/REVISOR RESPONSÁVEL: | | |
| Considerando-se a autoria da elaboração / revisão do documento: POP SEDT 025 – CUIDADOS E FLUXO COM O APARELHO DE ENDOSCÓPIO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA , cujos direitos da publicação supracitada, deve ser respeitada, autorizo o Núcleo de Gestão da Qualidade a disponibilizá-lo em meio eletrônico, no Serviço de Informação Hospitalar . Autorizo também sua divulgação na rede interna – intranet , no formato especificado, para fins de consulta por todos os funcionários do CA HCFMB . | | |
| Data: <i>26/11/20</i> | Assinatura: | |
| | Carimbo: Tatiane Santa Rosa Diniz Enfermeira COREMIQ - 285412 | |