



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 005 UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SPRAY DESENCROSTANTE



POP CME 005 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 21/06/2014 REVISÃO Nº 03 : 20/06/2023

1. OBJETIVO:

Verificar se o Material está sob ação do spray desencrostante, procedentes do Centro Cirúrgico Ambulatorial, Centro Obstétrico, Hemodinâmica e Endoscopia.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe do CME que atua no Expurgo e Equipes das unidades de Centro Cirúrgico Ambulatorial, Centro Obstétrico, Hemodinâmica e Endoscopia.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

3.2. Outros Materiais: infraestrutura do expurgo (pia, monta-cargas, cestas aramadas, cestos de lixo com pedal, hamper), frasco do produto spray desencrostante.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se para manipulação adequada dos instrumentais a serem recebidos: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC;

4.3. Romper lacre de segurança do spray enzimático;

4.4. Borrifair o spray enzimático, em posição vertical sob o material desde sua parte distal até a proximal;

4.5. Aguardar 5 (cinco) minutos do tempo de contato conforme orientação do representante;

4.6. Enxaguar corretamente todos os materiais que estiveram sob a ação direta do produto borrifado;

4.7. Colocar os materiais em lavadora termo desinfetadora, procedendo ciclo;

4.8. Realizar a desparamentação;



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 005 UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SPRAY DESENCROSTANTE



POP CME 005 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 21/06/2014 REVISÃO Nº 03 : 20/06/2023

4.9. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.10. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.11. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.12. Manter a unidade organizada.

5. CONTINGÊNCIA:

Na ausência do Spray Desencrostante a unidade deve fazer uma lavagem rápida para a remoção da sujidade e enviar o material ao CME tão logo haja possibilidade, não ultrapassando 30 min.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Comunicar a enfermeira responsável pelo plantão na CME caso o encaminhamento do material esteja em desacordo com o manual de normas e rotinas do setor;

6.2. O material de vídeo deve ser separado dos demais materiais, e suas pinças montadas, para evitar perdas, as lentes separadas de suas respectivas ópticas, protegidas e disponibilizadas em suas caixas para evitar danos e perdas, bem como a separação de ópticas das pinças de videolaparoscopia, quando forem constatadas situações de emergência.

6.3. Não efetuar retiradas e/ou desmonte de instrumentais que sejam de responsabilidade da equipe médica, buscando pelo responsável para fazê-lo.

6.4. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.

6.5. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.6. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 005 UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SPRAY DESENCROSTANTE



POP CME 005 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 21/06/2014 REVISÃO Nº 03 : 20/06/2023

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Peri operatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8.ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 005 UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SPRAY DESENCROSTANTE



POP CME 005 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 21/06/2014 REVISÃO Nº 03 : 20/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 005 – UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SPRAY DESENCROSTANTE		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 21/06/2014 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 20/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 005 – UTILIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DO SPRAY DESENCROSTANTE		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/2024	Assinatura:	
	Aprovação da Gerência do NPDT: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: 19/01/2024	Assinatura:	
	Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023