



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **013** PRÉ-LAVAGEM DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE NÃO RECEBERAM DETERGENTE SPRAY



POP CME **013** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **28/06/2014** REVISÃO Nº **03** : **20/06/2023**

1. OBJETIVO:

Submeter os materiais cirúrgicos a pré-lavagem, procedentes de unidades em que não houve aplicação de processo de desincrustação para reduzir a carga microbiana.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe do CME que atua no Expurgo e Equipes de Unidades Assistenciais.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I's): touca descartável, óculos de proteção, protetor facial, (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

3.2. Outros Materiais: água corrente quente e escovinha para remoção de sujidade.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se para manipulação adequada dos instrumentais a serem recebidos: touca descartável, óculos de proteção e/ou protetor facial, (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável, luvas de borracha e bota de PVC;

4.3. Verificar os materiais a serem reprocessados que não passaram por processo de desincrustação, separando-o dos demais;

4.4. Colocar os Materiais no interior da pia disponibilizada para a pré-lavagem deste;

4.5. Separar as pinças de pontas traumáticas (Pozzi, Backaus) e lavar separadamente, evitando acidentes e tomar o cuidado para não se ferir com as tesouras;

4.6. Manipular o material cuidadosamente evitando batidas ou quedas;

4.7. Abrir a torneira permitindo que haja escoamento de água por todo interior da Cesta entrando em contato com os Instrumentais;

4.8. Identificar os artigos que estão com matéria orgânica aderida a eles;

4.9. Esfregar individualmente cada material para remover toda sujidade aderida, principalmente artigos com lúmen estreito;



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **013** PRÉ-LAVAGEM DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE NÃO RECEBERAM DETERGENTE SPRAY



POP CME **013** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **28/06/2014** REVISÃO Nº **03** : **20/06/2023**

- 4.10. Separar cuidadosamente todos os materiais canulados para reprocessamento adequado;
- 4.11. Lavar manualmente cada material, com escovas para lúmen, conforme a espessura de cada instrumental;
- 4.12. Retirar todo resíduo com água corrente;
- 4.13. Encaminhar os materiais para processamento na Lavadora Ultrassônica;
- 4.14. Manter as cestas aramadas com o material pré-lavado dentro da pia, aguardando disponibilidade das termodesinfectoras;
- 4.15. Colocar os materiais pré-lavados na termodesinfectora conforme POP Específico;
- 4.16. Realizar a desparamentação conforme recomendação da CCIRAS, descartando os equipamentos passíveis de descarte em lixo próprio;
- 4.17. Realizando a limpeza das luvas de borracha e botas de PVC;
- 4.18. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
- 4.19. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS.

5. CONTINGÊNCIA:

- 5.1. Manter o instrumental dentro da pia pré-lavado em água limpa e quente até que haja disponibilidade de lavagem correta para remoção da matéria orgânica;
- 5.2. Não realizar nenhum procedimento sem devida paramentação;
- 5.3. Não efetuar retiradas e/ou desmonte de instrumentais que sejam de responsabilidade da equipe médica, buscando pelo responsável para fazê-lo.

6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Comunicar a Enfermeira responsável quando houver desacordo com o Manual de Normas e Rotinas CME.
- 6.2. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **013** PRÉ-LAVAGEM DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE NÃO RECEBERAM DETERGENTE SPRAY



POP CME **013** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **28/06/2014** REVISÃO Nº **03** : **20/06/2023**

6.3. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.4. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Peri operatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8.ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **013** PRÉ-LAVAGEM DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE NÃO RECEBERAM DETERGENTE SPRAY



POP CME **013** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **28/06/2014** REVISÃO Nº **03** : **20/06/2023**

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 013 – PRÉ-LAVAGEM DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE NÃO RECEBERAM DETERGENTE SPRAY		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: <u>28/06/2014</u> Total de páginas: <u>04</u> Data da Revisão: <u>20/06/2023</u> Número da Revisão: <u>02</u>		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 013 – PRÉ-LAVAGEM DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS QUE NÃO RECEBERAM DETERGENTE SPRAY Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: <u>19/01/2024</u>	Assinatura: Aprovação da Gerência do NPDT: Enf. ^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: <u>19/01/2024</u>	Assinatura: Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.^a Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023