



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 026 INSPEÇÃO CRITERIOSA DO MATERIAL DE VIDEOSCOPIA



POP CME 026 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 08/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

1. OBJETIVO:

Certificar de forma criteriosa a limpeza dos materiais de videoscopia para evitar o reprocessamento de forma inadequada.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe de Enfermagem da Endoscopia e Centro Cirúrgico.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): Touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), protetor auricular, avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

3.2. Equipamentos para Processamento: lavadora ultrassônica; lupa elétrica

3.3. Outros materiais: instrumentais reprocessados na lavadora ultrassônica, específico de videoscopia, compressas estéreis

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se para manipulação adequada dos instrumentais a serem recebidos: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), protetor auricular, avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

4.3. Estender pano limpo ou compressa estéril no balcão em que será inspecionado o material;

4.4. Abrir a lavadora ultrassônica, seguindo as regras de segurança;

4.5. Retirar os instrumentais da lavadora ultrassônica;

4.6. Colocar no balcão sobre a compressa estéril;

4.7. Secar com ar comprimido os instrumentais com lúmen e verificando a presença de resíduos;

4.8. Separar os materiais não reprocessados adequadamente;

4.9. Realizar a inspeção visual com auxílio da lupa elétrica peça por peça;

4.10. Encaminhar o material para limpeza dos instrumentais após a eficácia do processo de Inspeção;

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 026 INSPEÇÃO CRITERIOSA DO MATERIAL DE VIDEOSCOPIA



POP CME 026 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 08/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

4.11. Realizar a montagem dos materiais conforme padronização do sistema;

4.12. Encaminhar para o preparo;

4.13. Realizar a desparamentação;

4.14. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS.

5. CONTINGÊNCIA:

O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Em caso de inconformidade no processo comunicar o enfermeiro responsável pelo plantão.

6.2. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.

6.3. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.4. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 026 INSPEÇÃO CRITERIOSA DO MATERIAL DE VIDEOSCOPIA



POP CME 026 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 08/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 026 INSPEÇÃO CRITERIOSA DO MATERIAL DE VIDEOSCOPIA



POP CME 026 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 08/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 026 – INSPEÇÃO CRITERIOSA DO MATERIAL DE VIDEOSCOPIA		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 08/07/2014 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 026 – INSPEÇÃO CRITERIOSA DO MATERIAL DE VIDEOSCOPIA		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/2024	Assinatura:	
Aprovação da Gerência do NPDT: Enf. ^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira		
Data: 19/01/24	Assinatura:	
Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antonia Coelho		

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.^a Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023