



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **028** USO DE JATO D'ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS  
ORGÂNICOS



POP CME **028** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **08/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 1. OBJETIVO:

Realizar a limpeza e Higienização através de processo manual, através de mecanismo de jatos d'água sob pressão.

### 2. ABRANGÊNCIA:

Equipe do CME que atua no Expurgo.

### 3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), protetor auricular, avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

**3.2. Outros Materiais:** Escova para lúmen, Escova de cerdas macias, jato d'água sob pressão.

### 4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar se com EPIs: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), protetor auricular, avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC;

4.3. Separar todos os instrumentais que possuem lúmen;

4.4. Proceder à higienização na lavadora ultrassônica, unindo o instrumental aos conectores da lavadora ultrassônica;

4.5. Retirar o Instrumental após ciclo e enxaguar em água abundante;

4.6. Realizar o enxágue, preferencialmente com água aquecida, os artigos com lúmens, utilizando pistolas de água ou água sob pressão (bicos adaptadores da torneira) até remover a sujidade e a solução enzimática;

4.7. Secar o instrumental com ar comprimido;

4.8. Encaminhar ao preparo;

4.9. Realizar a desparamentação;

4.10. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 028 USO DE JATO D'ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS



POP CME 028 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 08/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

4.11. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.12. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Não efetuar retiradas e/ou desmonte de instrumentais que sejam de responsabilidade da equipe médica, buscando pelo responsável para fazê-lo.

### 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Se após enxágue não houver eficácia na limpeza, repetir todo o processo;

6.2. Não realizar nenhum procedimento de limpeza de materiais no expurgo sem a devida paramentação;

6.3. Não realizar nenhum procedimento no Expurgo sem a devida paramentação.

6.4. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.

6.5. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.6. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **028** USO DE JATO D'ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS  
ORGÂNICOS



POP CME **028** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **08/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.





## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 028 USO DE JATO D'ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS



POP CME 028 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 08/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

### 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade_hcfmb@unesp.br</p>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP CME 028 – USO DE JATO D'ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 08/07/2014 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>ASSINATURA</b>
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 028 – USO DE JATO D'ÁGUA SOB PRESSÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/24	Assinatura:	
	Aprovação da Gerência do NPDT: Enf. <sup>a</sup> Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: 19/01/24	Assinatura:	
	Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.<sup>a</sup> Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.<sup>a</sup> Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023