



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 032 LIMPEZA DO EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE - MESHER



POP CME 032 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

1. OBJETIVO:

Realizar limpeza de forma adequada do Instrumental, garantindo a qualidade do processo de limpeza, evitando riscos de infecção hospitalar.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe de Enfermagem CME que atua no Expurgo.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), protetor auricular, avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

3.2. Outros Materiais: Álcool a 70%, compressas secas e limpas.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se com EPIs: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), protetor auricular, avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC;

4.3. Detergente Enzimático, Escova de cerdas macias, compressas;

4.4. Retirar o expansor de enxerto de pele da caixa;

4.5. Colocar o Instrumental sobre a bancada;

4.6. Desconectar com cuidado a manivela do Instrumental;

4.7. Virar o Instrumental para manipular os parafusos;

4.8. Desparafusar até o ponto de trava os quatro parafusos abaixo do dispositivo de corte;

4.9. Soltar o dispositivo sem forçar sua retirada;

4.10. Virar novamente o Instrumental;

4.11. Abrir a dobra superior;

4.12. Apertar o trinco para corte do rolo na lateral do Instrumental;

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 032 LIMPEZA DO EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE - MESHER



POP CME 032 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

- 4.13. Retirar o rolo cuidadosamente;
- 4.14. Lavar rolo e dispositivo com escova de cerdas macias e solução de Detergente Enzimático;
- 4.15. Lavar dispositivo e manivela em água abundante;
- 4.16. Realizar enxágue abundante em água corrente;
- 4.17. Repetir o processo caso verifique presença de sujidade;
- 4.18. Encaminhar o Instrumental para a limpeza na termo desinfetadora ou ultrassônica;
- 4.19. Secar o Instrumental com compressas ou ar comprimido caso a secagem seja inadequada;
- 4.20. Enviar ao preparo;
- 4.21. Realizar a desparamentação;
- 4.22. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;
- 4.23. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
- 4.24. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS.

5. CONTINGÊNCIA:

Na falta de Detergente Enzimático utilizar Detergente Neutro Hospitalar.

6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Não realizar nenhum procedimento de limpeza de materiais no expurgo sem a devida paramentação.
- 6.2. Não efetuar retiradas e/ou desmonte de instrumentais que sejam de responsabilidade da equipe médica, buscando pelo responsável para fazê-lo.
- 6.3. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.
- 6.4. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 032 LIMPEZA DO EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE - MESHER



POP CME 032 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

6.5. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.6. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDS nº 15, 15 de março de 2012.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 032 LIMPEZA DO EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE - MESHER



POP CME 032 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP CME 032 – LIMPEZA DO EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE – MESHER

1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

1.3. Data da Elaboração: 15/07/2014 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 29/06/2023

Número da Revisão: 03

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 032 – LIMPEZA DO EXPANSOR DE ENXERTO DE PELE – MESHER

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: 19/07/2024	Assinatura: Aprovação da Gerência do NPDT: Enf. ^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira
Data: 19/07/24	Assinatura: Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.^a Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023