



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 033 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO



POP CME 033 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

1. OBJETIVO:

Realizar a limpeza e Desinfecção de forma adequada do Instrumental, garantindo a qualidade do processo de limpeza, evitando riscos de infecção hospitalar.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe do CME que atua no Preparo.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável de manga longa, protetor auricular, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC.

3.2. Outros Materiais: Esponja macia, detergente enzimático, pistola de água ou seringa de 20 ml.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se para manipulação adequada dos materiais a serem recebidos: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), máscara de carvão ativado (PFF2), avental impermeável de manga longa, protetor auricular, luvas de borracha de cano longo e botas de PVC;

4.3. Receber o Material em sua própria caixa;

4.4. Conferir número de peças e a Integridade do Material;

4.5. Colocar o Material na bancada da pia;

4.6. Separar as pinças fibra óptica e cabos de bisturi monopolar e bipolar dos demais componentes;

4.7. Limpar a fibra óptica e os cabos de bisturi monopolar e bipolar manualmente com esponja macia e detergente enzimático;

4.8. Retirar cuidadosamente as pinças do suporte, uma de cada vez;

4.9. Abrir a pinça cuidadosamente;

4.10. Apertar botão na parte distal da manopla;

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 033 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO



POP CME 033 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

- 4.11. Soltar a pinça;
- 4.12. Puxar a roldana preta para trás;
- 4.13. Liberar as hastes;
- 4.14. Retirar as hastes conforme sua disposição;
- 4.15. Retirar uma haste de cada vez totalizando 4 peças até chegar ao corpo da pinça;
- 4.16. Retirar todas as hastes para melhor limpeza separando-as em seus pares, encaminhar a lavadora ultrassônica;
- 4.17. Realizar limpeza com Detergente Enzimático escova macia adequada;
- 4.18. Escovar os Materiais com movimentos delicados, removendo toda a sujidade ainda presente;
- 4.19. Enxaguar os materiais para remoção de toda solução enzimática;
- 4.20. Enxaguar seus lumens com auxílio de seringas ou pistola de água;
- 4.21. Encaminhar o Material para lavadora ultrassônica;
- 4.22. Realizar o ciclo específica para o tipo de Material;
- 4.23. Enxaguar cuidadosamente o Material;
- 4.24. Secar o Material com ar comprimido;
- 4.25. Encaminhar o material para o Preparo, montado e organizado para evitar perdas e dano ao material;
- 4.26. Realizar a desparamentação;
- 4.27. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;
- 4.28. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
- 4.29. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS.

5. CONTINGÊNCIA:

Na falta de Detergente Enzimático utilizar Detergente Neutro.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 033 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO



POP CME 033 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

6. OBSERVAÇÕES:

- 6.1. Comunicar a enfermeira responsável pelo plantão CME caso o encaminhamento do material esteja em desacordo com o manual de normas e rotinas do setor;
- 6.2. Realizar limpeza manual nas pinças, fibras ópticas e cabos de bisturi monopolar e bipolar.
- 6.3. Não utilizar álcool em nenhuma hipótese;
- 6.4. Não efetuar retiradas e/ou desmonte de instrumentais que sejam de responsabilidade da equipe médica, buscando pelo responsável para fazê-lo.
- 6.5. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.
- 6.6. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.
- 6.7. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

7. AUTORES E REVISORES

- 7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.
- 7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 033 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO



POP CME 033 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 15/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br</p>	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 033 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 15/07/2014 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 033 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO NEURO ENDOSCÓPIO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/2024	Assinatura:	
Aprovação da Gerência do NPDT: Enf. ^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira		
Data: 19/01/24	Assinatura:	
Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho		

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.^a Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.^a Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023