



# PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **040** CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO



POP CME **040** - PÁG.: **1/3** EMISSÃO: **23/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

## 1. OBJETIVO:

Garantir o funcionamento correto do Processo, realizando a conferência da limpeza e higiene dos materiais cirúrgicos analisando os resultados dos testes de qualidade de limpeza, realizados na termodesinfetadora.

## 2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do CME que atuam na Área de Preparo.

## 3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** touca descartável, avental descartável (roupa privativa), luvas de procedimento e calçado fechado.

**3.2. Outros Materiais:** lâminas de teste; recipientes para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduo biológico; cestas aramadas com instrumentais; livro de registro; etiqueta de conferência; termodesinfetadora.

## 4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se com os Epis: luvas de procedimento, gorro, touca descartável, avental descartável (roupa privativa) e calçado fechado;

4.3. Abrir a termodesinfetadora;

4.4. Observar a presença das lâminas de testes na termodesinfetadora, distribuídas dentro das cestas aramadas;

4.5. Retirar todas as lâminas testes;

4.6. Inspeccionar cada lâmina teste;

4.7. Avaliar à presença ou ausência de sujidade, conforme orientação do fabricante;

4.8. Descartar as lâminas teste em local apropriado;

4.9. Inserir outras lâminas de teste no equipamento, se forem observadas sujidade nelas;

4.10. Comunicar o setor de expurgo sobre a ocorrência de sujidade nas lâminas de teste;

4.11. Repetir o ciclo de lavagem dos materiais;

4.12. Conferir novamente as lâminas

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **040** CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO



POP CME **040** - PÁG.: **2/3** EMISSÃO: **23/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

4.13. Descartar as lâminas teste em local apropriado;

4.14. Realizar a desparamentação;

4.15. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.16. Registrar o resultado da avaliação de todas as amostras no livro de controle.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

### 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

6.2. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados imediatamente após seu manuseio em caixa coletora de materiais perfurocortantes.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes e Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



# PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 040 CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO



POP CME 040 - PÁG.: 3/3 EMISSÃO: 23/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS</b> <b>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU</b> NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6216 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP CME 040 – CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 23/07/2014 Total de páginas: 03 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>ASSINATURA</b>
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 040 – CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/07/2024	Assinatura:	
	Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: 19/07/24	Assinatura:	
	Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023