



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **043** SEPARAÇÃO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES CIRURGICAS



POP CME **043** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 1. OBJETIVO:

Separar os materiais de acordo com a especialidade inspecionando a limpeza e higienização dos materiais cirúrgicos, garantindo a qualidade do processo da Termodesinfetadora.

### 2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do CME que atuam na Área de Preparo.

### 3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** Touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), protetor auricular, avental descartável de manga longa, luvas de procedimento, luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado.

**3.2. Outros Materiais:** Álcool 70 INPM, campos limpos.

### 4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se com os EPIs necessários: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), protetor auricular, avental descartável de manga longa e calçado fechado;

4.3. Limpar a Bancada com um pano limpo e álcool 70 INPM;

4.4. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.5. Calçar Luva Térmica;

4.6. Abrir a tampa da Termodesinfetadora;

4.7. Retirar o Material da Termodesinfetadora;

4.8. Encaminhar os cestos aramados para a Bancada de Inspeção;

4.9. Separar o material de acordo com a prioridade de uso;

4.10. Atentar principalmente para as especialidades de cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia vascular e urologia;

4.11. Separar o instrumental em suas caixas;

4.12. Retirar a Luva Térmica;

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **043** SEPARAÇÃO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS



POP CME **043** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

4.13. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.14. Calçar as luvas de procedimento;

4.15. Separar todo instrumental de acordo com cada modelo de pinças;

4.16. Conferir peça por peça, avaliando seu estado de conservação;

4.17. Verificar presença sujidade, ferrugem, trincas, manchas e outros defeitos;

4.18. Separar as peças de acordo com defeito observado na inspeção;

4.19. Separar as peças com sujidades para repetir o processo da Termodesinfectora;

4.20. Separar as peças com trincas ou quebradas para substituição;

4.21. Realizar a desparamentação;

4.22. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos); conforme recomendação da CCIRAS.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

### 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

6.2. Comunicar a Enfermeira de plantão no CME sobre os instrumentais quebrados para realizar a reposição necessária;

6.3. Se instrumental apresentar alguma sujidade, ferrugem, manchas, devem ser encaminhados para o expurgo para novo processo de lavagem e realizar imersão do mesmo em solução antioxidante por 20 minutos.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes e Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **043** SEPARAÇÃO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES CIRURGICAS



POP CME **043** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **043** SEPARAÇÃO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS



POP CME **043** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail <a href="mailto:qualidade.hcfmb@unesp.br">qualidade.hcfmb@unesp.br</a>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP CME 043 – SEPARAÇÃO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS.

1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

1.3. Data da Elaboração: 30/07/2014 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 29/06/2023  
Número da Revisão: 03

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:  
Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	

#### 2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 043 – SEPARAÇÃO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS.

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: <u>19/01/2024</u>	Assinatura: Núcleo de Procedimento Diagnóstico e Terapêutico: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira
Data: <u>19/01/24</u>	Assinatura: Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023