



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **044** SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS



POP CME **044** - PÁG.: **1/6** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 1. OBJETIVO:

Avaliar a qualidade do processo de limpeza do material após a separação e inspeção visual de cada peça ou componente dos materiais inalatórios.

### 2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do CME que atuam na Área de Preparo.

### 3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** Touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), protetor auricular, avental descartável de manga longa (roupa privativa do setor), luvas de procedimento, luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado.

**3.2. Outros Materiais:** Campos limpos; bancadas para manipulação do material, rede de ar comprimido.

### 4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se com os EPIs necessários: touca descartável, óculos de proteção, protetor facial (viseira), protetor auricular, avental descartável de manga longa (roupa privativa do setor) e calçado fechado;

4.3. Separar cesta aramada para autoclave ou para termodesinfetadora;

4.4. Colocar a cesta aramada em cima da bancada do preparo e próxima da termodesinfetadora;

4.5. Forrar a cesta aramada com campo limpo e claro;

4.6. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.7. Calçar as luvas térmicas impermeáveis;

4.8. Abrir a porta da termodesinfetadora;

4.9. Puxar para si o rack da termodesinfetadora;

4.10. Verificar presença de água nos materiais;

4.11. Desprezar a água residual presente nos materiais;



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **044** SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS



POP CME **044** - PÁG.: **2/6** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

- 4.12. Retirar primeiramente os materiais que estão soltos e por cima das tubulações, as cânulas de guedel, frascos de aspiração, etc...;
- 4.13. Verificar a presença de sujidade, secreções ou qualquer tipo de anormalidade com o material;
- 4.14. Separar os Materiais com presença de sujidade e anormalidades dos Materiais limpos;
- 4.15. Colocar dentro das cestas em cima do campo os Materiais que estiverem adequadamente limpos;
- 4.16. Separar por Setor ou Unidade Assistencial;
- 4.17. Retirar as máscaras encaixadas no rack;
- 4.18. Verificar a presença de sujidade, secreções ou qualquer tipo de anormalidade com as máscaras;
- 4.19. Colocar dentro das cestas e em cima do campo limpo as máscaras que estiverem adequadamente limpas;
- 4.20. Retirar as tubulações e extensões para aspiração da termodesinfectora;
- 4.21. Verificar a presença de sujidade, secreções ou qualquer tipo de anormalidade com as tubulações e extensões para aspiração;
- 4.22. Separar os materiais com presença de sujidade e anormalidades das tubulações limpas;
- 4.23. Retirar luvas impermeáveis;
- 4.24. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);conforme recomendação da CCIRAS
- 4.25. Calçar luvas de procedimentos;
- 4.26. Enrolar as extensões em círculo;
- 4.27. Injetar ar comprimido na parte interna e externa das extensões e tubulações;
- 4.28. Enrolar as tubulações e as extensões em círculo;
- 4.29. Colocar dentro das cestas e em cima do campo limpo as tubulações que estiverem adequadamente limpas, com abertura para cima ou colocar as mesmas posicionadas verticalmente na secadora;
- 4.30. Retirar os demais acessórios como máscaras, conexões, barakas do rack;
- 4.31. Verificar presença de água no material;
- 4.32. Desprezar o excesso;



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **044** SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS



POP CME **044** - PÁG.: **3/6** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

- 4.33. Colocar os acessórios dentro das cestas e em cima do campo limpo;
- 4.34. Encaminhar as cestas, uma a uma para secagem do material na secadora;
- 4.35. Abrir a porta da secadora;
- 4.36. Distribuir as cestas de acordo com a capacidade da secadora;
- 4.37. Separar os acessórios para colocá-los um a um, encaixados na grade da parte superior da secadora;
- 4.38. Fechar a porta da secadora;
- 4.39. Dar início no ciclo para secagem;
- 4.40. Repetir o processo até que o material esteja completamente seco;
- 4.41. Realizar a desparamentação;
- 4.42. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;
- 4.43. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);
- 4.44. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;
- 4.45. Separar os materiais conforme setor específico;
- 4.46. Empacotar Kits individualmente;
- 4.47. Selar os pacotes na seladora comum;
- 4.48. Etiquetar todo material com identificação, data de desinfecção e validade.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Na impossibilidade de utilizar a secadora por qualquer problema, realizar a secagem manual do material com compressas e ar comprimido.

### 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **044** SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E  
MONTAGEM DOS MATERIAIS



POP CME **044** - PÁG.: **4/6** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

6.2. Comunicar a Enfermeira de plantão no CME sobre os instrumentais quebrados para realizar a reposição necessária.

6.3. Se instrumental apresentar alguma sujidade, ferrugem, manchas, devem ser encaminhados para o expurgo para novo processo de lavagem e realizar imersão do mesmo em solução antioxidante por 20 minutos.

6.4. Na falta de peças das tubulações, realizar reposição se possível.

6.5. Imprimir etiquetas com o nome do Material (Tubulações), Setor, Data de Preparo, data de validade de 15 dias e responsável pelo preparo;

6.6. Colar uma etiqueta em cima de cada material;

6.7. Conferir os dados da etiqueta com o material embalado;

6.8. Colocar as embalagens identificadas dentro do hamper, fechar o hamper;

6.9. Encaminha as tubulações embaladas ao Centro Cirúrgico.

6.10. Funcionários que fazem uso de óculos de grau, na ausência de óculos de sobrepor, fazer uso de viseiras de proteção facial.

6.11. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.12. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes e Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **044** SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS



POP CME **044** - PÁG.: **5/6** EMISSÃO: **30/07/2014** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 044 SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS



POP CME 044 - PÁG.: 6/6 EMISSÃO: 30/07/2014 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

### 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | HOSPITAL DAS CLÍNICAS<br>FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU<br>NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE<br>Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil<br>Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br |  |
| <b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b> |   |  |

#### 1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP CME 044 – SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS.

1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

1.3. Data da Elaboração: 30/07/2014 Total de páginas: 06 Data da Revisão: 29/06/2023

Número da Revisão: 03

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

| NOME                              | SETOR | ASSINATURA |
|-----------------------------------|-------|------------|
| Priscila Eburneo Laposta Spadotto | CME   |            |
|                                   |       |            |
|                                   |       |            |

#### 2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 044 – SEPARAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DO MATERIAL INALATÓRIO E MONTAGEM DOS MATERIAIS.

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

|                  |   |
|------------------|---|
| Data: 09/01/2024 | Assinatura:<br>Núcleo de Procedimento Diagnóstico e Terapêutico: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira                |
| Data: 09/01/2024 | Assinatura:<br>Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho |

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023