



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 053 CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO



POP CME 053 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 02/08/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

1. OBJETIVO:

Garantir o funcionamento correto do Processo, realizando a conferência da limpeza e higiene dos materiais cirúrgicos analisando os resultados dos testes de qualidade de limpezas realizadas na termodesinfetadora.

2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do CME que atuam na Área de Preparo.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), luvas de procedimento, luvas de borracha (ranhurada), luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado.

3.2. Outros Materiais: Lâminas de teste, recipientes para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduo biológico, cestas aramadas com instrumentais, livro de registro, etiqueta de conferência, termodesinfetadora.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se com os EPIs necessários: touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), luvas de borracha (ranhurada), luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado;

4.3. Abrir a termodesinfetadora;

4.4. Observar a presença das lâminas de testes na termodesinfetadora, distribuídas dentro das cestas aramadas;

4.5. Retirar todas as lâminas testes;

4.6. Inspeccionar cada lâmina teste;

4.7. Retirar as luvas térmicas impermeáveis;

4.8. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.9. Calçar as luvas de procedimento;

4.10. Avaliar à presença ou ausência de sujidade, conforme orientação do fabricante;

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **053** CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA
TERMODESINFECÇÃO



POP CME **053** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **02/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

- 4.11. Descartar as lâminas teste em local apropriado;
- 4.12. Inserir outras lâminas de teste no equipamento, se forem observadas sujidade nelas;
- 4.13. Comunicar o setor de expurgo sobre a ocorrência de sujidade nas lâminas de teste;
- 4.14. Repetir o ciclo de lavagem dos materiais;
- 4.15. Conferir novamente as lâminas;
- 4.16. Descartar as lâminas teste em local apropriado;
- 4.17. Realizar a desparamentação;
- 4.18. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;
- 4.19. Registrar o resultado da avaliação de todas as amostras no livro de controle;

5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes e Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **053** CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO



POP CME **053** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **02/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 053 CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO



POP CME 053 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 02/08/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 053 – CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 02/08/2015 Total de páginas: 03 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 053 – CONFERÊNCIA E REGISTRO DO TESTE DE QUALIDADE DA TERMODESINFECÇÃO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/2024	Assinatura: Núcleo de Procedimento Diagnóstico e Terapêutico: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: 19/01/24	Assinatura: Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023

CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO