



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **054** CONFERÊNCIA DOS ITENS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS



POP CME **054** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **02/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 1. OBJETIVO:

Garantir a qualidade do processo, realizando a conferência dos itens de segurança e eficácia padronizados pela RDC 15/2012.

### 2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do CME.

### 3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), luvas de procedimento, luvas de borracha (ranhurada), luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado.

**3.2. Outros materiais:** Lápis e Papel para notificação de Não Conformidades.

### 4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.2. Paramentar-se com os EPIs necessários: touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado;

4.3. Aguardar o total resfriamento dos Equipamentos de Esterilização existentes na Unidade: Autoclaves e Reprocessadora de Baixa Temperatura;

4.4. Retirar o material dos Equipamentos, colocando-os em carrinhos de transporte;

4.5. Retirar as luvas térmicas;

4.6. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.7. Calçar as luvas de procedimento;

4.8. Aferir todo o material, considerando-se a identificação nas embalagens dos produtos para a saúde, submetidos à esterilização, por meio de rótulos ou etiquetas com o Nome do Produto, Número do Lote, Data da Esterilização, Data Limite de Uso e Nome do Responsável pelo Preparo;

4.9. Separar o artigo que não apresentar os itens de identificação citados;



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **054** CONFERÊNCIA DOS ITENS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS



POP CME **054** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **02/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

4.10. Anotar na folha de controle de Esterilização dos Artigos, o número da autoclave, o processo realizado, data, horário de término e responsável pela atividade executada e a ausência das identificações padronizadas;

4.11. Garantir que o rótulo dos artigos reprocessados se mantenham legíveis e fixados nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição, até o momento do uso;

4.12. Liberar os artigos para acondicionamento;

4.13. Realizar a desparamentação;

4.14. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos) conforme recomendação da CCIRAS;

4.15. Comunicar intercorrências ao enfermeiro de plantão.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

### 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

6.2. **ART. 83** – É OBRIGATÓRIA A IDENTIFICAÇÃO NAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS PARA SAÚDE SUBMETIDOS À ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE RÓTULOS OU ETIQUETAS.

6.3. **ART. 84** – O RÓTULO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE PROCESSADOS DEVE SER CAPAZ DE SE MANTER LEGÍVEL E AFIXADO NAS EMBALAGENS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ATÉ O MOMENTO DO USO.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes e Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME **054** CONFERÊNCIA DOS ITENS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PROCESSO  
DE ESTERILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS



POP CME **054** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **02/08/2015** REVISÃO Nº **03** : **29/06/2023**

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 054 CONFERÊNCIA DOS ITENS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS



POP CME 054 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 02/08/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

### 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail: qualidade.hcfmb@unesp.br	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP CME 054 – CONFERÊNCIA DOS ITENS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: 02/08/2015 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 29/06/2023 Número da Revisão: 03		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>ASSINATURA</b>
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 054 – CONFERÊNCIA DOS ITENS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 19/01/2024	Assinatura:	
	Núcleo de Procedimento Diagnóstico e Terapêutico: Enf. <sup>a</sup> Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: 19/01/24	Assinatura:	
	Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.<sup>a</sup> Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.<sup>a</sup> Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023