



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 001 LIMPEZA DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 001 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 16/11/2017 REVISÃO Nº 05 : 19/05/2023

## 1. OBJETIVO:

Promover a limpeza das máquinas hemodialisadoras após a utilização e sempre que for necessário.

## 2. ABRANGÊNCIA:

Equipe que atua na Seção Técnica de Hemodiálise do HC Unesp – Botucatu.

## 3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** máscara cirúrgica, óculos de segurança e luvas de procedimento.

**3.2. Materiais específicos para o procedimento:** álcool (70%) ou quaternário de amônia, sabão líquido, lixo branco, água e pano multiuso.

## 4. PROCEDIMENTO:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Colocar máscara cirúrgica, óculos de segurança e luvas de procedimento;

4.3. Retirar todos os objetos colocados na parte superior da máquina;

4.4. Remover os isoladores de pressão e desprezá-los, se necessário;

4.5. Retirar o SF 0,9%, com o equipo, das astes da máquina;

4.6. Desprezar em lixo branco;

4.7. Remover os galões de soluções da base da máquina;

4.8. Embeber o pano multiuso com álcool 70% ou quaternário de amônia;

4.9. Realizar a limpeza da parte superior da máquina, em movimento unidirecional, da parte distante para perto, tocando o lado do pano multiuso a cada movimento, para remover toda a sujeira que pode ter ficado fixada durante a hemodiálise;

4.10. Trocar o pano multiuso sujo por limpo sempre que necessário;

4.11. Abrir a alavanca dos conectores hansens e realizar a limpeza das mangueiras em toda a sua extensão, manter os conectores acoplados a elas e limpar toda a extensão;

Aprovação da Gerência do Núcleo de Internações: Enf.ª Daniele de Oliveira Gomes | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 001 LIMPEZA DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 001 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 16/11/2017 REVISÃO Nº 05 : 19/05/2023

4.12. Limpar todos os lados da máquina, principalmente o painel superior;

4.13. Realizar limpeza com água e sabão, antes da desinfecção, quando houver, sujidade visível;

4.14. Retirar as luvas e a máscara, descartar em lixo hospitalar;

4.15. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.16. Retirar os óculos de segurança;

4.17. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.18. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.19. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

## 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

## 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. **Limpeza concorrente** → Deve ser realizada ao fim de cada sessão de hemodiálise e sempre que necessário.

6.2. **Limpeza terminal** → deve ser realizada ao fim do dia, após os três turnos de hemodiálise.

6.3. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.4. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 001 LIMPEZA DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 001 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 16/11/2017 REVISÃO Nº 05 : 19/05/2023

## 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Edwa Maria Bucuvic

7.2. Revisores: Daniele Lopes Dionísio/ Marci Maira Batissoco Lunardi

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Hendricks, H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.

- FELIPPE, MJDB. MENDONÇA, AM. PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas recomendadas. 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 001 LIMPEZA DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 001 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 16/11/2017 REVISÃO Nº 05 : 19/05/2023

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail <a href="mailto:qualidade.hcfmb@unesp.br">qualidade.hcfmb@unesp.br</a></p>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP DIAL 001 – LIMPEZA DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS		
1.2. Área Responsável: UNIDADE DE DIÁLISE		
1.3. Data da Elaboração: 16/11/2017 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 19/05/2023 Número da Revisão: 05		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Daniele Lopes Dionísio	UNIDADE DE DIÁLISE	
Marci Maira Batissoco Lunardi	UNIDADE DE DIÁLISE	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP DIAL 001 – LIMPEZA DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS. Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 29/01/24	Núcleo de Internações: Enf. <sup>a</sup> Daniele de Oliveira Gomes Assinatura: Enf. Daniele de Oliveira Gomes Gerente do Núcleo de Internações COREN/SP 333.590	
Data: 30/01/24	Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho Assinatura:	

Aprovação da Gerência do Núcleo de Internações: Enf.<sup>a</sup> Daniele de Oliveira Gomes | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.<sup>a</sup> Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023