



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 003 DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 003 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 24/09/2015 REVISÃO Nº 08 : 19/05/2023

## 1. OBJETIVO:

Promover a desinfecção das máquinas hemodialisadoras após a utilização e sempre que necessário.

## 2. ABRANGÊNCIA:

Equipe que atua na Seção Técnica de Hemodiálise do HC Unesp – Botucatu.

## 3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):** máscara cirúrgica, óculos de segurança e luvas de procedimento.

**3.2. Materiais específicos para o procedimento:** Galão de ácido cítrico 50% para máquinas B Braun e galão de ácido peracético 3,5% para máquinas Fresenius.

## 4. PROCEDIMENTO:

### 4.1 Desinfecção Máquina Fresenius e B Braun (deverá ser realizada ao fim de cada sessão de hemodiálise)

4.1.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.2. Colocar máscara cirúrgica, óculos de segurança e luvas de procedimento;

4.1.3. Colocar as ponteiras de aspiração (ácida e bicarbonatada) das soluções eletrolíticas no dispositivo da máquina;

4.1.4. Abrir o dispositivo para acoplar os bicos do Hansen na máquina, caso estejam conectados ao capilar;

4.1.5. Conectar o produto químico no local indicado pelo fabricante. (Quando solicitado troca);

4.1.6. Acionar a tecla de desinfecção, e utilizar as setas para selecionar o programa de desinfecção desejada;

4.1.7. Acompanhar o processo de desinfecção, anotando anormalidades;

4.1.8. Aguardar todo o procedimento;

4.1.9. Preparar a máquina conforme rotina do serviço para a próxima sessão;



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 003 DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 003 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 24/09/2015 REVISÃO Nº 08 : 19/05/2023

4.1.10. Desligar a máquina em caso de não ser mais utilizada;

4.1.11. Retirar as luvas e a máscara, descartar em lixo hospitalar;

4.1.12. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.13. Retirar os óculos de segurança;

4.1.14. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.1.15. Seguir com a higienização dos óculos, conforme a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT);

4.1.16. Realizar higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

## 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

## 6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Os óculos de segurança devem ser lavados com água e sabão neutro e secado com papel macio e, apenas em casos de procedimentos de assistência com pacientes de isolamento e/ou projeção de secreções e líquidos biológicos, após a secagem, deve ser utilizado álcool 70°, (até que seja liberada a utilização de quaternário de amônia). Em ambos os casos, após a lavagem, evitar friccionar o papel para secagem nas lentes, de maneira a prevenir riscos.

6.2. Retirar os óculos de segurança, SOMENTE, ao término de todo procedimento, inclusive descarte e lavagem de materiais utilizados, devendo este ser higienizado separadamente.

## 7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Edwa Maria Bucovic

7.2. Revisores: Daniele Lopes Dionísio/ Marci Maira Batissoco Lunardi



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 003 DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 003 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 24/09/2015 REVISÃO Nº 08 : 19/05/2023

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Hendricks, H. Planejamento e Organização do Serviço de Enfermagem. Manual de Normas e Rotinas. Apostila. São Paulo. CEDAS. Centro Universitário São Camilo. 1998. 87p.
- FELIPPE, MJDB. MENDONÇA, AM. PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.
- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Práticas recomendadas. 5 ed. São Paulo: SOBECC, 2009.
- Manual de hemodiálise. Manual de operações. Versão de Software:4.5. Edição:18/09.08. Cód art: M395871. Fresenius Medical Care.
- Manual Bbraun sharing expertise. IFU38910147/ Ver 2.02/ September 2010.
- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.





# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA UNIDADE DE DIÁLISE

POP DIAL 003 DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS



POP DIAL 003 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 24/09/2015 REVISÃO Nº 08 : 19/05/2023

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail <a href="mailto:qualidade.hcfmb@unesp.br">qualidade.hcfmb@unesp.br</a></p>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>		
1.1. Título: POP DIAL 003 – DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS		
1.2. Área Responsável: UNIDADE DE DIÁLISE		
1.3. Data da Elaboração: 24/09/2015 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 19/05/2023 Número da Revisão: 08		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Daniele Lopes Dionísio	UNIDADE DE DIÁLISE	
Marci Maira Batissoco Lunardi	UNIDADE DE DIÁLISE	
<b>2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):</b>		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP DIAL 003 – DESINFECÇÃO DAS MÁQUINAS HEMODIALISADORAS Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 29/01/24	Núcleo de Internações: Enf. <sup>a</sup> Daniele de Oliveira Gomes Assinatura: Enf. Daniele de Oliveira Gomes Gerente do Núcleo de Internações CGREN/SP 333.590	
Data: 30/01/24	Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho Assinatura:	

Aprovação da Gerência do Núcleo de Internações: Enf.<sup>a</sup> Daniele de Oliveira Gomes | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023  
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.<sup>a</sup> Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023