



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO 001 TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO



POP NAPAT SVO 001 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 27/11/2023 REVISÃO Nº :

1. OBJETIVO:

Padronizar a coleta de amostras para investigação de pacientes que foram a óbito em critério de suspeição de COVID-19 (através de kit para teste rápido), de modo que os profissionais possam realizar o procedimento de maneira segura e a coleta seja realizada de maneira correta, garantindo a qualidade da amostra. Para casos pontuais, em que mesmo havendo a suspeição de COVID-19 com o paciente ainda em vida, o mesmo não foi submetido a nenhum tipo de teste para atestar sua positividade ou negatividade.

2. ABRANGÊNCIA:

Equipe médica e técnica do Setor de Necropsia do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) do complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): luvas de procedimento, máscara N95 ou PFF-2, protetor facial (viseira), avental descartável, gorro.

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: kit de detecção para COVID-19 (formato de teste rápido individual) para secreção de nasofaringe, contendo recipiente para tiras, tampão de migração e bula de instruções em português; recipiente seguro para descarte de material biológico.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool em gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Reunir todo o material necessário;

4.3. Separar todos os materiais do teste (Teste Rápido Covid-Ag) em uma superfície plana;

4.4. Paramentar-se com EPIs, seguindo orientações do **POP NAPAT GER 007 – PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECROSCÓPICOS E LIMPEZA DA SALA DE PROCEDIMENTOS**;

4.5. Acomodar o paciente em óbito no carro pantográfico para a realização do procedimento;

4.6. Remover o dispositivo de teste da embalagem e manter sobre uma superfície plana;

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade | Aprovação CCIAS / SESMT / Núcleo Hospitalar de Epidemiologia



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO **012** TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO



POP NAPAT SVO **012** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **27/11/2023** REVISÃO Nº :

4.7. Furar o lacre do tubo de tampão de amostra com o auxílio da ponta do tampão do tubo, pressionando-a para abrir completamente o lacre;

4.8. Remover a tampa do tubo pressionando a parte superior do tubo, imediatamente abaixo da tampa, empurrando-a para fora (apoar a tampa em uma superfície limpa, com a cobertura de proteção virada para baixo);

4.9. Inclinare a cabeça do paciente em óbito para trás, levemente (aproximadamente 45 - 70o), para que as narinas fiquem mais acessíveis;

4.10. Retirar o swab da embalagem;

4.11. Inserir o swab ao longo do septo nasal, paralelamente ao palato, na nasofaringe, até sentir resistência. O cotonete deve atingir uma profundidade igual a distância das narinas até a abertura externa da orelha. Se ocorrer resistência durante a inserção da escova de algodão, puxe-a para fora e tente inseri-lo na narina oposta;

4.12. Girar o swab delicadamente na narina de 3 a 4 vezes;

4.13. Deixar o swab por 3 segundos para absorver as secreções;

4.14. Remover lentamente o swab;

4.15. Inserir o swab no tubo e mergulhe-o no tampão de amostra. Aperte o tubo pressionando a ponta do swab e gire-o 5 vezes;

4.16. Remover o swab, garantindo que o máximo de material permaneça no tubo, e descarte o swab com os resíduos infectantes;

4.17. Colocar a tampa novamente no tubo, certificando-se que esteja bem fechado;

4.18. Remover o dispositivo de teste da embalagem e colocá-lo em uma superfície limpa;

4.19. Remova a cobertura de proteção do conta-gotas e descarte as duas primeiras gotas com os resíduos infectantes;

4.20. Dispense 3 (três gotas) da amostra no poço de amostra;

4.21. Ler o resultado após 15 minutos;

4.22. Desprezar o material descartável (luvas, etc.) em local apropriado;

4.23. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade | Aprovação CCIRAS / SESMT / Núcleo Hospitalar de Epidemiologia



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO **001** TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO



POP NAPAT SVO **001** - PÁG.: **3/4** EMISSÃO: **27/11/2023** REVISÃO Nº :

5. CONTINGÊNCIAS:

5.1. Em casos de Teste positivo Reagente, segue-se o procedimento necroscópico convencional com os devidos cuidados de biossegurança da equipe, evitando-se extravasamento de fluidos corpóreos. Após o término do procedimento, deve-se efetuar higienização de todo o local e equipamentos utilizados. A equipe do serviço terceirizado deve ser informada sobre o resultado do teste, para que haja o preparo e acondicionamento do cadáver dentro dos pressupostos adotados pela empresa funerária responsável.

5.2. Em casos de Teste negativo ou inconclusivo, segue-se procedimento necroscópico convencional dentro dos padrões já estabelecidos em protocolo.

5.3. Em casos de teste positivo Reagente, esta informação deve constar no relatório de necropsia e em declaração de óbito.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Resultado positivo (+): coloração na linha de teste (T) e na linha de controle, independentemente da intensidade da coloração, é considerado REAGENTE para Covid-19.

6.2. Resultado negativo (-): Quando apenas a linha de controle (C) apresenta coloração é considerado NÃO REAGENTE para Covid-19.

6.3. Resultado inválido: Quando a linha de controle (C) não se apresentar visível; nesse caso deve-se testar novamente usando novo kit. Se necessário, recomenda-se rever as instruções do teste.

7. AUTORES

7.1. Autores: Marcos Roberto Franchi e Dra. Daniela Cristina dos Santos.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.

- https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manejo_corpos_covid19_definicao_necropsia.pdf: Manejo de Corpos no contexto da Covid-19: definição dos procedimentos para retorno na realização de necropsia convencional; 3ª edição; Ministério da Saúde.

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade | Aprovação CCIAS / SESMT / Núcleo Hospitalar de Epidemiologia



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLÓGICA - NAPAT

POP NAPAT SVO **012** TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO



POP NAPAT SVO **012** - PÁG.: **4/4** EMISSÃO: **27/11/2023** REVISÃO Nº :

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br</p>	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP NAPAT SVO 012 – TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO.

1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE ANATOMIA PATOLOGIA – NAPAT

1.3. Data da Elaboração: 27/11/2023 Total de páginas: 04 Data da Revisão:

Número da Revisão:

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Dra. Daniela Cristina dos Santos	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	
Marcos Roberto Franchi	Núcleo de Anatomia Patológica – NAPAT	

2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NAPAT SVO 012 – TESTE RÁPIDO DE COVID-19 EM PACIENTES QUE FORAM A ÓBITO.

Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: <u>28/02/2024</u>	Nome Completo Diretor: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais
	Assinatura:

Aprovação: Diretor do Serviço / Gerência de Diretor do Núcleo: Dr. Marcelo Padovani de Toledo Morais

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade | Aprovação CCIRAS / SESMT / Núcleo Hospitalar de Epidemiologia