



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 059 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE



POP CME 059 - PÁG.: 1/3 EMISSÃO: 17/09/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

1. OBJETIVO:

Manter a integridade dos artigos evitando sua contaminação, acondicionando de forma adequada para sua dispensação.

2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do CME.

3. MATERIAL E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos);

4.2. Paramentar-se com os EPIs necessários: touca descartável, protetor auricular, avental descartável (roupa privativa do setor), luvas térmicas impermeáveis e calçado fechado;

4.3. Abrir a porta da autoclave;

4.4. Deixar a porta da autoclave aberta por 10 minutos;

4.5. Colocar luvas térmicas;

4.6. Puxar o rack de dentro da autoclave para o carrinho;

4.7. Deixar os materiais no rack esfriando por 30 minutos;

4.8. Colocar os cestos sobre a bancada;

4.9. Recarregar o rack com cestos vazios, colocando-o novamente dentro da autoclave e fechar sua porta;

4.10. Retirar as luvas térmicas impermeáveis;

4.11. Colocar os artigos em carrinhos de transporte interno e guardá-los nos armários de acordo com suas especificações;

4.12. Observar indicador classe 1 se o mesmo alterou a cor de amarelo para marrom indicando que passou pelo processo de esterilização;

4.13. Observar a integridade e condições do pacote;

4.14. Atentar para correta identificação do material com data, lote, prazo de validade e nome do material e funcionário responsável;



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 059 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE



POP CME 059 - PÁG.: 2/3 EMISSÃO: 17/09/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

4.15. Acondicionar em local limpo e seco longe da luz solar;

4.16. Realizar a desparamentação;

4.17. Realizar a higienização das mãos com água e sabão antisséptico (mínimo 30 segundos) ou álcool gel (mínimo 15 segundos).

5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. O lote do material está em processo de implantação.

6.2. O manuseio de máquinas e equipamentos devem ser realizados apenas por trabalhadores qualificados e habilitados com treinamento certificado.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Ana Lúcia G. Tavares, Bruna Bueno T. Lemos, Fabiana Regina C. D'Império, Viviana Carolina O. Moraes, Williany Dark Serafim.

7.2. Revisores: Priscila Eburneo Laposta Spadotto.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FELIPPE MJDB, MENDONÇA AM, PRANUVI, MB. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão do Centro de Materiais e Esterilização. Hospital Estadual Bauru. 2004. 24p.

- SOBECC. Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Diretrizes de Práticas em Enfermagem Perioperatória e Processamento de Produtos para Saúde. 8ª ed. São Paulo: SOBECC, 2021.

- BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde). Portaria MTB 3.214 de 08 de junho de 1978.



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO DO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO

POP CME 059 ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE



POP CME 059 - PÁG.: 3/3 EMISSÃO: 17/09/2015 REVISÃO Nº 03 : 29/06/2023

9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP CME 059 – ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.		
1.2. Área Responsável: CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO		
1.3. Data da Elaboração: <u>17/09/2015</u> Total de páginas: <u>03</u> Data da Revisão: <u>29/06/2023</u> Número da Revisão: <u>03</u>		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Priscila Eburneo Laposta Spadotto	CME	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CME 059 – ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL ESTERILIZADO EM AUTOCLAVE.		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: <u>27/03/2024</u>	Assinatura: Núcleo de Procedimento Diagnóstico e Terapêutico: Enfª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira	
Data: <u>27/03/2024</u>	Assinatura: Aprovação da Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Monique Antônia Coelho Supervisora Técnica Serviço de Terapia Intensiva COREN - SP 0343529	

Aprovação da Gerência do NPDT: Enf.ª Tatiane Roberta Fernandes Teixeira | CCIRAS/SESMT - Gestão 2023
Presidente da Comissão de Padronização da Assistência de Enfermagem: Enf.ª Monique Antônia Coelho

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2023